

Kenotest

produs pentru detectarea mastitei subclinice (metoda C.M.T)

Descriere

Keno Test permite detectarea numărului celulelor somatice din lapte.

Kenotest este indicatorul perfect pentru detectarea rapidă a mastitei subclinice. Bazat pe metoda C.M.T., oferă o indicație semi-cantitativă a nivelului de celule somatice prezente în lapte. A se utiliza împreună cu paleta specială de testare

Utilizare

Detectarea mastitei subclinice

Controlează eficiența tratamentului împotriva mastitei

Indicații de utilizare

Eliminați primele 3 jeturi de lapte, deoarece acestea conțin bacterii prezente în canalul mamelar.

Adunați aproximativ 2 ml de lapte în fiecare cupă a paletei. Fiecare cupă corespunde unui sfert mamar.

Aruncați laptele care este în exces.

Adăugați 2 ml de Keno Test în fiecare cupă a paletei (o presiune a pompei= 2 ml).

Amestecați pentru aproximativ 15 secunde paleta printr-o mișcare oscilatorie.

După 30 de secunde, comparați aspectul fiecărui amestec cu tabelul și determinați nivelul de celule de pe fiecare sfert.

Aruncați din paletă amestecul obținut.

Înainte de a utiliza din nou paleta, aceasta trebuie spălată și uscată.

TABELUL PENTRU INTERPRETAREA REZULTATELOR

CMT	INTERPRETAREA	CCI (celule/ ml)
	Amestec lichid fără gel	0-200 000
Suspiciune infectie		
Urme	Gel ușor vizibil prin transparentă Va dispărea după 10 secunde	> 200 00- 500 00
1	Gel ușor vizibil prin transparentă, persistent	>500 000- 1 000 000
Infecție cronică		
2	Gel vizibil Adeziune pe pahar - filament vâscos	> 1 000 000 - 5 000 000
3	Gel vâscos asemeni albușului de ou	> 5 000 000

Specificații

Aspect

Lichid Roșu și Mov

pH (100%)

ca. 10,75

Date despre coroziune/precauții

Citiți cu atenție fișa de siguranță.